

Indium, seerumi, S-In

Näyte

3 ml **seerumia**

Hivenaineanalytiikkaan tarkoitettu 6 ml alipaineputki ilman antikoagulanttia (esim. Venosafe tai Vacuette®) otetaan täyteen verta ja annetaan hyytyä.

Lähetettävä seerumi erotetaan lähetysputkeen käyttäen puhdasta kertakäyttöpipettiä. Työterveyslaitoksen toimittama näytteen lähetysastia sisältyy hintaan Suomessa.

Näytteenottoaika

Iltanäyte: Näyte otetaan työvuoron päätyttyä.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilytetään jääkaapissa lähetykseen asti ja postitetaan siten, että se ehtii analysoivaan laboratorioon ennen viikonvaihdetta. Loppuviikosta otetut näytteet säilytetään kylmässä viikonlopun yli ja postitetaan seuraavana maanantaina.

Näyteastiatilaukset

Biomonitoroinnin näyteastiatilaukset, lähetteet ja lähetysohjeet

Näytteenotossa erityisesti huomioitavaa

Tutkimuspyyntölomakkeen (lähetteen) huolellinen täyttäminen on tärkeää sekaannusten välttämiseksi ja viiveiden vähentämiseksi. Erityisesti pyydetään kiinnittämään huomiota **nimen** ja **henkilötunnuksen** oikeellisuuteen. Tehtävät **analyysit** tulee merkitä selvästi lähetteeseen. **Laskutusosoite** ja **y-tunnus**, **työnantaja**, **työterveyshuolto**, **lähettävä laboratorio**, **näytteenottoaika** ja **päivämäärä** tulee myös kirjata virallisilla nimillä. Yhteyshenkilön puhelinnumero, soittoaika ja sähköpostiosoite nopeuttavat näytteeseen liittyvien asioiden selvittelyä ja yhteydenottoja erityisesti viiterajojen ylittävien tulosten tulokinnassa ja altistumisen vähentämiseen tähtäävien toimenpiteiden neuvonnassa. Tutkimuspyyntölomakkeen epäselvyydet viivästyttävät analyysivastauksen

saantia. Tilaaja sitoutuu analyysipalvelujen tilausehtoihin toimittaessaan näytteen Työterveyslaitokselle.

Altiste

Indium ja sen yhdisteet

Toimitusaika

Sopimuksen mukaan

Kategoriat

[Biomonitorointipalvelut](#)

Näyteastioiden tilaus

[Tilaa näyteastioita](#)

Analyysien tilausohjeet ja lomakkeet

[Siirry palvelusivuille](#)