

FFP-suojaimen pukeminen

Suodattava puolinaamari suodattaa hengitysilmaasta pölyjä ja aerosoleja. Tunnistat sen merkinnästä **FFP1**, **FFP2** tai **FFP3**.

FFP3-merkinnällä varustettu on näistä tehokkain.



1. Pese kädet ja käytä tarvittaessa käsihuuhdetta.
2. Tarkista suojaimen kunto, erityisesti riittävä puhtaus, nenäpinne sekä hihnat.
3. Jos otat uuden, tarkista pakkauksesta, että suodattimen säilytysaika ei ole mennyt umpeen.
4. Pue suojain ennen menoa paikkaan, jossa on ilman epäpuhtauksia.
5. Ota pois silmälasit, päähine ja muut päähän puettavat suojaimet.
6. Muotoile suojain sopivaksi kasvoille.
7. Pue suojain. Toinen nauhoista tulee niskan taakse ja toinen noin 45 asteen kulmaan takaraivolle yläosaan.
8. Muotoile nenäpinne painaen kahdella sormella molemmilta puolilta nenää.
9. Pue päällesi tarvitsemasi muut suojaimet, silmälasit ja päähine.
10. Paina kämmenesi kevyesti suojaimen pintaa vasten estääksesi ilman kulkua.
11. Jos suojaimessa on uloshengitysventtiili, vedä syvään henkeä.
12. Jos suojaimessa ei ole uloshengitysventtiiliä, hengitä voimakkaasti.
13. Jos tunnet ilmavirran kasvoilla esimerkiksi nenänpielessä tai leuan alla, suojain vuotaa. Asettele suojain paremmin kasvoillesi ja kokeile uudelleen. Tarvittaessa vaihda toisen kokoinen tai toisen mallinen, yhtä tehokas hengityksensuojain. Älä aloita työtä, jos et saa suojainta tiivistymään.

**LUE KÄYTTÖOHJE JA PIDÄ SE TALLELLA.
SIINÄ ON KÄYTÖN JA SÄILYTYKSEN OHJEET.**